

## TRACOE Tracheostomiekannülen (Außen- und Innenkanüle(n)) mit Reinigungspulver

Die Tracheostomiekannüle(n) sind Ein-Patienten-Produkte und haben eine Nutzungsdauer von max. 29 Tagen bzw. bis zu 6 Monaten (TRACOE *comfort*). Zur fachgerechten Reinigung können Reinigungsprodukte, Pulver (REF 932) oder enzymatisches Konzentrat (REF 933), genutzt werden.

Es darf immer nur eine Kanüle, d. h. eine Außen- und die dazugehörige(n) Innenkanüle(n) nebeneinander in den Siebeinsatz gelegt werden, um Verwechslungen beim späteren Zusammensetzen zu vermeiden.

Die Reinigungsdose mit Siebeinsatz, die verwendeten Hilfsmittel sowie die erstellte Reinigungslösung dürfen nur für **Kanüle(n) eines Patienten** genutzt werden.

**Bitte beachten Sie die entsprechenden Gebrauchsanweisungen.**

- Das Reinigungspulver ist ein wirksames Reinigungsmittel (Einwirkzeit 10 – 15 Minuten).
- Das Reinigungskonzentrat ist ein wirksamer, enzymatischer Schnellreiniger.

Die Außen- und Innenkanüle(n) werden je nach Klinikstandard/Pflegeeinrichtungsstandard bei Bedarf gereinigt oder ersetzt, wobei die tägliche Reinigung der Innenkanüle empfohlen wird.

### TRACOE tube clean Reinigungsset mit Reinigungspulver REF 932

**REF 930-A** • mit 50 kleinen  
Reinigungstupfern (REF 935)

**REF 930-B** • mit 50 großen  
Reinigungstupfern (REF 936)

Inklusive: • Reinigungsdose  
mit Siebeinsatz (REF 934)



**Alle Artikel können auch einzeln erworben werden.**

Zusätzlich erhältlich: Reinigungsbürsten REF 938 und REF 940

Weitere Infos auf [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com) oder im Produktkatalog.



## REINIGUNG MIT PULVER

- 1** Einen Messlöffel (ca. 5 g) Pulver und 500 ml lauwarmes Wasser in Trinkwasserqualität in der Reinigungsdose gründlich mischen.



**Die maximale Standzeit der Lösung beträgt 24h.**

- 2** Die Außenkanüle bzw. die Innenkanüle(n) mit lauwarmem Wasser in Trinkwasserqualität abspülen und ggf. mit einem Reinigungstupfer oder -bürste reinigen. Die Reinigungstupfer sind Einmalmaterial und werden nach dem Gebrauch entsorgt.

- 3** Anschließend die Kanülen nebeneinander in den Siebeinsatz legen und in die Reinigungslösung eintauchen.



**Die Einwirkzeit beträgt 10 bis max. 15 Minuten.**

Der Pilotballon darf nicht in die Reinigungslösung eingetaucht werden.

- 4** Nach der Einwirkzeit den Siebeinsatz aus der Dose nehmen. Eventuell verbleibende Sekretablagerungen in den Kanülen mit einem Reinigungstupfer entfernen.

- 5** Danach die Außen- und Innenkanüle(n) mit lauwarmem Wasser in Trinkwasserqualität gründlich spülen und mit einem fusselfreien Tuch trocknen. Anschließend weiter an der Luft trocknen.

- 6** Die Tracheostomiekannüle trocken und vor Licht und Schmutz geschützt aufbewahren. Es ist besonders darauf zu achten, dass während der Aufbewahrung keine feuchte Kammer entsteht.

- 7** Die Kanüle vor dem Wiedereinsetzen stets auf Unversehrtheit überprüfen. Kanülen mit Cuff zusätzlich auf Dichtigkeit prüfen.

**WICHTIG!** Die Kanülen nie über Stunden oder über Nacht in der Reinigungslösung lassen.